

cardex Schutzvisiere



cardex Schutzvisier Groß

CB510 Schildlänge 21,5 cm

Entspricht allen Anforderungen der Hygiene. Hervorragender Schutz für Augen und Atmungsorgane. Eine Antifog-Beschichtung bewahrt die Schilder vor dem Beschlagen.

CB513 **cardex** Ersatzschild groß (21,5 cm)

CB512 **cardex** Ersatzstirnband für CB510




cardex Schutzvisier Klein

CB520 Schildlänge 18 cm

Identisch CB510, nur mit 18 cm Schild

CB523 **cardex** Ersatzschild klein

CB512 **cardex** Ersatzstirnband für CB520

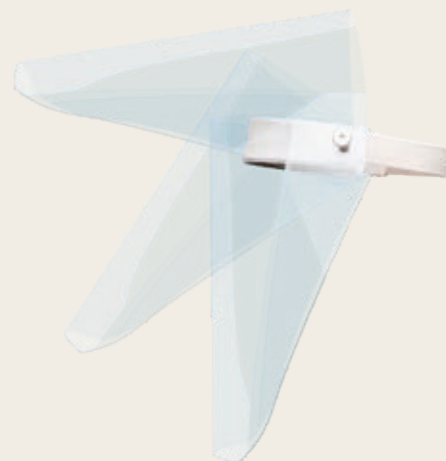

Das Schild ist leicht auswechselbar, hochklappbar und in jeder Position fixierbar!

Entdecken Sie weitere Schutzvisiere



SURGERY VISOR - VR1-E

Ultra leichter Metallrahmen, der individuell angepasst werden kann. Das Schild kann hochgeklappt werden und lässt sich leicht reinigen und auswechseln.

Mit zusätzlichem Schild auf der Stirn.

VR1-E2 Ersatzschild 2-tlg. für Visor VR1-E

SURGERY VISOR - VR1

Entspricht dem Modell Surgery Visor-VR1-E nur ohne Schild auf der Stirn.

VR12 Ersatzschild für Visor

VR13 Ersatzschild für Visor - 10er Packung

VR14 Ersatzband für Visor



SURGERY LIGHT - V20

Leichter Schutz mit ergonomischen Stirnaufsatz und elastischem Band.

V21 Visor Light - 5er Packung

Für Ihren vollständigen Schutz bieten wir eine breite Palette an Schutzausrüstung auf unserer Website:

CARDEXDENTAL.COM



cardex Schutzvisiere



Der beste Schutz für Arzt/Ärztin und Assistenz gegen Infektionen. Die Cardex Schutzbrille verhindert Verletzungen der Augen durch Metall- und andere Abriebsplitter. Schützt Augen, Atmungsorgane und optische Gläser. Die Cardex Schutzbrille entspricht allen Anforderungen moderner Hygiene. Die spezielle Oberflächenbehandlung garantiert ein beschlagsfreies Sichtfeld und einen UV-Schutz. Achtung: kein Lichtbogen-Schutz! Das Schild ist hochklappbar! Die Cardex Schutzbrille ist einfach zu reinigen und das Schild leicht auswechselbar!

Gebrauchsanweisung

Hersteller: Cardex Dental GmbH
Reutlingen
D- 72760

Sicherheitsstandard: Nach DIN-EN 166, Richtlinie- 89/689/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 .

Artikelnummer: Informationen auf Rückseite

Benutzung, Pflege und Lagerung:

Die Cardex Schutzbrille darf nur für den empfohlenen Bereich (Zahnarztpraxis, Dentallabor, Zahnprophylaxe und OP-Einsatz) verwendet werden. Das Schild hat einen UV- aber keinen Lichtbogenschutz. Legen Sie die Cardex Schutzbrille nach Gebrauch mit der Innenseite ab. So vermeiden Sie unnötige Kratzer. Die Cardex Schutzbrille muß so gelagert werden, dass sich das Schild nicht verformen kann. (Temperatur -10°C bis 55°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von <80%)

Reinigung und Desinfektion:

Reinigen Sie das Schild nie trocken!

Wir empfehlen für die Reinigung und Pflege: antibakterielle Seife oder ein alkoholfreies Pflege- und Desinfektionsmittel. Anschließend mit einem weichen Baumwolltuch sorgfältig trocknen. Bei einer herkömmlichen Desinfektion nur eine maximale 2%ige Alkohollösung verwenden. Bei höher prozentigen Mitteln kann das Schild trüb werden!

Verwendungsbereich, Schutzwirkung und Funktionseigenschaften:

Die Cardex Schutzbrille ist für den Einsatz in zahnärztlichen Ordinationen, Prophylaxebehandlungen und Dentallabors vorgesehen und ausgestattet. Das Schild schützt Augen, Gesicht und optische Gläser vor Metall- und Abriebsplitter und Spraywasser.

Zubehör und Ersatzteile:

Das elastische Stirnband kann stufenlos jeder Körpergröße angepasst werden. Das Cardex Schutzschild und Stirnband können jederzeit ausgewechselt werden.

Verfallszeitraum:

Zerkratzte, trübe oder beschädigte Schilder und schlecht sitzende Stirnbänder müssen umgehend ausgewechselt werden, um ein unbeeinträchtigtes Arbeiten zu gewährleisten.

Verpackung:

Die Cardex Schutzbrille wird transportgerecht verpackt, so kann das Schild weder geknickt, noch zerkratzt werden.

Kennzeichnung:

cardex 1 S EN 166 CE | Kennbuchstaben des Herstellers: **cardex**

Klasse	Sph(dpt)	Ast(dpt)	Pris(cm/m)
1	± 0,06	0,06	0,12

Erhöhte Festigkeit: S

Zertifikatstelle Stelle: PTB Braunschweig, Bundesallee, D-38116 Braunschweig Nummer der CE Zertifizierungsstelle: 0102

Kontroll- und Prüfverfahren:

1. Kontrolle der Brechwerte mit einer Messanordnung und Genauigkeit nach EN 167.
2. Kontrolle der mechanischen Festigkeit mit einer Kugelfalleinrichtung entsprechend EN 168.
3. Sichtkontrolle hinsichtlich scharfer Ecken und Kanten.
4. Sichtkontrolle hinsichtlich Werkstoff- und Fertigungsfehler

Warnung:

Zerkratzte oder beschädigte Schilder müssen sofort ausgetauscht werden. Die begrenzte Lebensdauer hängt von den oben genannten Kriterien ab. Bei beeinträchtigter Sicht muß das ,Schild sofort ausgetauscht werden.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - verschluckbare Kleinteile!



Cardex Dental GmbH | Dresdner Platz 7 | 72760 Reutlingen | DE363996321

Tel: +49 (0) 07121 61 644 | E-Mail: cardex@cardexdental.com | Web: CARDEXDENTAL.COM