

RETRAKTIONSRINGE

Für den idealen Abdruck, zusammen mit CARDEX SILMIX

- Zur temporären Verdrängung des Zahnfleisches
- Saugfähig, dünn, weich, elastisch und trotzdem "reifest"
- Erhltlich in 6 Gren - dadurch keine Zwischengren ntig



SULC PRO

Retraktionsringe - ungetrnkt.



SULC PRO - 6 PACK

ArtNr: R430

Alle 6 Gren, sortiert, ca. 300 St.,
in praktischer 6-Fach-Box.



SULC PRO - REFILL

ArtNr per Gre:

R431, R432, R433, R434, R435, R436

Nachfllpackung, Gr. 1-6, ca. 100 St.

CARDEX TRNKFLSSIGKEIT

ArtNr: TR480

Adstringierende, blutstillende Sprayflssigkeit - 10 ml.

Fr ungetrnkte SULC PRO Retraktionsringe.

ACHTUNG: Ausschlielich fr SULC PRO Ringen.

Zuerst die Ablageflche der Ringe besprhen, dann
diese auflegen und nochmals einsprachen.

Inhaltsstoffe: Aluminium sulfuricum, Oxychinolinsulfat,
Acidum tartaricum, Kalium metabisulfurosum, Aqua destillata.



SULC PRO EXTRA

Die „EXTRA“ Retraktionsringe sind bereits mit der Cardex Trnkflssigkeit vorbehandelt.



SULC PRO EXTRA - 6 PACK

ArtNr: R460

Alle 6 Gren, sortiert, ca. 300 St.,
in praktischer 6-Fach-Box.



SULC PRO EXTRA - REFILL

ArtNr per Gre:

R461, R462, R463, R464, R465, R466

Nachfllpackung, Gr. 1-6, ca. 100 St.

- Leicht dosierbar
- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- Leichte Entnahme aus dem Mund
- Ausgezeichnet knetbar

- Snap-Set Abbindeverhalten
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Besonders geeignet für die Zweiphasen-Abformung mit **SILMIX LIGHT**

Silmix Putty 2 x 400g

ArtNr: SP1X400

1 x Basis + 1 x Katalisator à 400g



Silmix Putty 2 x 800g

ArtNr: SP2X800

1 x Basis + 1 x Katalisator à 800g



Silmix Light 2 x 60g

ArtNr: SL909793

Ausgezeichnetes Anfließverhalten
Normalhärtend, dünnfließend



2 x

12 x

Silmix Medium 2 x 60g

ArtNr: SM909792

Gute Fließigenschaften
Normalhärtend, mittelfließend



Der ideale Abdruck mit dem CARDEX SILMIX Doppelabdruck:

- 1** Erstabdruck
Der Erstabdruck wird mit SILMIX PUTTY vor der Präparation gemacht.
 - 2** Beschleifen
 - 3** Retraktionsringe aufsetzen
(unge tränkte Ringe müssen zuerst mit Cardex-Tränkflüssigkeit imprägniert werden) und so tief wie möglich in den Sulcus einbringen. Bei Bedarf 2 Ringe verwenden.
 - 4** Zweitabdruck
Nach wenigen Minuten Retraktionsringe entfernen, Erstabdruck mit wenig SILMIX LIGHT einstreichen und um die präparierten Zahnstümpfe spritzen! Danach wieder einsetzen.
- Der CARDEX Doppelabdruck ergibt:
- ✓ Einen exakten Abdruck der beschliffenen Stümpfe
 - Einen exacten Abdruck des Gegenkiefers
 - Eine exacte Bissnahme